



TAMPA VERMELHA / TAMPA AMARELA



**Setor Imunoquímica**

Ácido Úrico  
Ácido Fólico  
Ácido Valproico  
Albumina  
Alfa 1 Glicoproteína Ácida  
Alfafetoproteína  
Amilase  
Androstenediona  
ATPO/ATG  
Beta 2 Microglobulina  
Beta HCG (quantitativo)  
Bicarbonato  
Bilirrubinas  
Cálcio  
Cálcio Ionizado  
Capacidade de Ligação do Ferro (TIBC)  
Carbamazepina  
CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3  
CK/CKMB  
CKMB Massa  
Clearance de Creatinina (urina de 24h e tubo vermelho/amarelo. Os dois materiais devem ser coletados obrigatoriamente na mesma data).  
Colesterol Total e Frações  
Colinesterase  
Cortisol Plasmático **(Coletar tubo único)**  
Creatinina  
DHL  
Digoxina  
Eritropoetina  
Estradiol  
Estríol  
Fenitoína  
Fenobarbital  
Ferritina  
Ferro Sérico  
Fosfatase Alcalina  
Fósforo  
Frutosamina

Gama GT  
GH  
IgE Total **(Coletar tubo único)**  
IGF-1  
IGFBP-3  
Insulina  
LH/FSH  
Lipase  
Lítio  
Magnésio  
Mioglobina  
PCR/ASLO/FR  
PCR US  
Pro BNP  
Progesterona  
Prolactina  
Proteínas Totais  
PSA Total e Livre  
PTH **(congelado – coletar 1 tubo extra)**  
SDHEA  
SHBG  
Sódio/Potássio/Cloro  
T3 Total e T3 Livre  
T4 Total e Livre  
Testosterona Total e Livre  
TGO/TGP  
Tireoglobulina  
TRAB — AC. Receptor TS  
Transferrina  
Triglicérides  
Troponina  
TSH  
Ureia  
Vancomicina **(Coletar tubo único)**  
Vitamina B12  
Vitamina D  
**Coletar 1 tubo de 5ml em seu volume total para os demais exames listados.**

**Setor Imunossorologia**

ATRE  
Citomegalovírus  
Hepatite A  
Hepatite B  
Hepatite C  
HIV 1+2  
HTLV  
Methotrexathe **(congelado – 1 tubo)**  
Rubéola  
Toxoplasmose  
COVID  
**Apenas 1 tubo de 5,0 ml para todos os exames, independentemente do número de exames.**  
**COVID (Iga, Igg, e/ou Igm) – Coletar em um tubo separado.**

**Setor Rotinas Especiais**

Chagas  
DHEA  
DHT  
Eletroforese de Proteínas **(Coletar tubo único)**  
FAN  
IgA, IgG e IgM  
**Coletar 1 tubo para os demais exames listados.**

**Setor Provas de Alergia**

RAST  
**A cada 10 exames coletar 1 tubo.**

**Setor Toxicologia**

Cobre  
Zinco  
**Apenas 1 tubo de 5,0 ml para todos os exames, independentemente do número de exames.**



TAMPA ROXA

**Setor Hematologia**

Coombs Direto  
Hb Glicosilada (A1C)  
Hemograma  
Reticulócitos  
Tipagem Sanguínea  
VHS  
**Coletar 2 tubos de 4ml para os exames listados acima. Não utilizar tubo de 2ml para o exame VHS. Tipagem sanguínea de cordão umbilical deverá vir em tubo separado.**

**Setor Manuais**

Eletroforese de Hemoglobina  
**Coletar apenas 1 tubo de 4ml para todos os exames, independentemente do número de exames. Utilizar o tubo de 2,0 ml apenas para acessos difíceis.**

**Setor Imunossorologia**

BNP  
Homocisteína  
**Congelado, coletar 1 tubo.**  
Ciclosporina  
Tacrolimus  
**Coletar 2 tubos.**



TAMPA AZUL

**Setor Hematologia**

Dímero D  
Fibrinogênio  
TP/INR  
TTPA  
**Coletar 2 tubos de 3,5ml para os exames listados. Utilizar tubo de 2ml apenas para acessos difíceis.**



TAMPA AZUL-MARINHO  
TUBO TRACE

**Setor Toxicologia**

Cadmio  
Chumbo  
**Coletar 1 tubo para os exames listados.**

**Setor de Apoio**

Mercúrio  
**Coletar 1 tubo.**



TAMPA PEROLADA

**Setor Biologia Molecular**

Carga Viral para:  
Citomegalovírus  
Hepatite B  
Hepatite C  
HIV Quantitativo  
**Coletar 1 tubo para cada exame.**



TAMPA CINZA

**Setor Imunoquímica**

Glicose  
Lactato  
**Coletar 2 tubos para os exames listados.**



TAMPA VERDE

**Setor de Apoio**

Vitamina K  
**Coletar 1 tubo.**

**Setor Citogenética**

Cariótipo Banda G  
**Coletar 1 tubo de 4ml em seu volume total.**

**Setor Toxicologia**

Vitamina C  
**Coletar 1 tubo.**



TAMPA BRANCA

**Setor Toxicologia**

Alumínio/Cromo/Manganês/Níquel/Selênio  
**Coletar 1 tubo para os exames listados.**

**SETOR URINÁLISE**

**URINA TIPO I**

Kit Coletor Não Estéril



**SETOR ESPERMOGRAMA**

**ESPERMOGRAMA**

Coletor Universal Estéril (tampa amarela)



**SETOR DOSAGENS URINÁRIAS**

**URINA DE 24 HORAS**

Calciúria  
Cortisol  
Glicosúria  
Microalbuminúria  
Proteinúria



**SETOR PARASITOLOGIA**

**DOSAGEM DE GORDURA FECAL  
COPROLÓGICO FUNCIONAL**

Frasco de Fezes




**SANGUE OCULTO**

Frasco Universal (tampa branca)



**PPF (PROTOPARASITOLÓGICO)**

TF-TEST

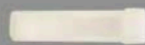

**SWAB ANAL**

Fita Gomada



OBS.: atenção! Este exame não é realizado com o swab e sim com fita adesiva transparente.

**SETOR MICROBIOLOGIA**

**CULTURA DE SECREÇÃO**

Meio de Cultura Amies ou Stuart



**PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B**

1 meio de Cultura Amies para Anal  
1 meio de Cultura Amies para Vaginal

**COPROCULTURA**

Meio de Cultura Carry Blair



**BACTERIOSCOPIA**

Lâmina



**LÍQUOR**

Tubo Cônico Estéril



**UROCULTURA**

Tubo Coletor Estéril



**CULTURA DE BK**

Coletor Universal Estéril (tampa vermelha)



**ESPERMOCULTURA**

Coletor Universal Estéril (tampa amarela)



\* Espermograma + espermocultura - realizado em coleta especial.